




Conectado al dispositivo de transmisión

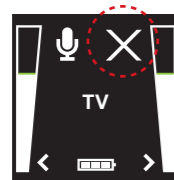

No se encuentra el dispositivo de transmisión

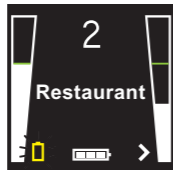


Batería baja del audífono izquierdo

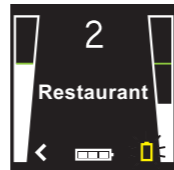


Batería baja del audífono derecho


Para obtener más información sobre Remote Control 2, consulte la guía del usuario.

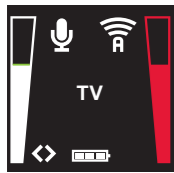

Seleccionado el volumen de los audífonos izquierdo y derecho

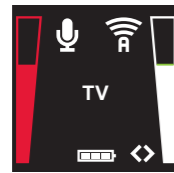

Seleccionado el volumen de transmisión de la izquierda y la derecha

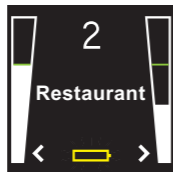

Batería baja de Remote Control 2



Programa de teléfono activado



Every Kirkland Signature product is guaranteed to meet or exceed the quality standards of the leading national brands. If you're not completely satisfied, your money will be refunded.

Costco Wholesale Mexico Division
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765

400245238-ES Rev. A 13.09

13V1193b



INTRODUCCIÓN (GUÍA RÁPIDA)

Remote Control 2 para audífonos del modelo KS562-DRW



A PRIMEROS PASOS

Carga de la batería

Antes de utilizar el Mando a Distancia 2 es necesario cargar completamente la batería recargable. Para cargarla, inserte el cable de carga según se muestra a la derecha. A continuación, enchufe el otro extremo en una toma de corriente. Durante la carga se van mostrando las barras del medidor de la batería. Cuando la batería está completamente cargada aparecen las tres barras de forma fija.



NOTA Consulte a su audioprotesista para determinar si los audífonos han sido pre-emparejados. No es necesario volver a emparejar audífonos que han sido pre-emparejados.

Encender y apagar Remote Control 2

Para encender Remote Control 2 coloque el interruptor en la posición ON.

Un icono "I" blanco se muestra en la base del interruptor y se enciende la pantalla.

Para apagarlo, deslice el conmutador ON/OFF a la posición OFF.



No recargue Remote Control 2 cuando lo lleve puesto.

B EMPAREJAR EL MANDO A DISTANCIA

Asegúrese de que el Mando a Distancia 2 está totalmente cargado y encendido.

1. Abra la tapa de las pilas de ambos audífonos.
2. Pulse el botón de emparejamiento en el Mando a Distancia 2 para activar el modo de emparejamiento, que estará activo durante 20 segundos.
3. Mientras esté activado el modo de emparejamiento, cierre la tapa de la batería de ambos audífonos.




4. Remote Control 2 busca los audífonos.

5. Si el emparejamiento es correcto se indica mediante una melodía en ambos audífonos y se muestra en la pantalla de del Mando a Distancia 2 con las barras de volumen activas y el programa "1". Ya puede utilizar el Mando a Distancia 2.



PANTALLAS




Búsqueda de ambos audífonos

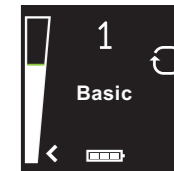

Conectado al audífono izquierdo y buscando el audífono derecho

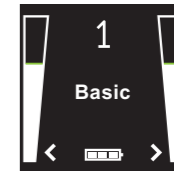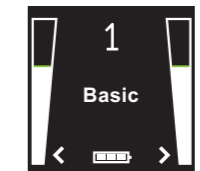

Programa 1 en ambos audífonos

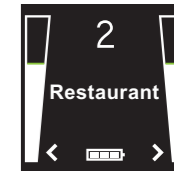

Programa 2 en ambos audífonos