

GUÍA DEL USUARIO

Mini Mic



Bienvenido

Felicidades por la compra de Mini Mic inalámbrico, un transmisor de alta calidad para el habla y el sonido.

Mini Mic transmite voz y audio directamente a los audífonos.

La funcionalidad de entrada directa de Mini Mic le proporcionará una señal de audio (mono) desde el equipo de música, ordenador personal, televisión o dispositivo similar directamente a sus audífonos.

Lea cuidadosamente el manual para beneficiarse plenamente de Mini Mic. Consulte a su audioprotesista si tiene dudas.

Por su seguridad, lea cuidadosamente el capítulo Información Importante que empieza en la página 23.

FCC ID: X26SM-1

Declaración

Este aparato cumple los requisitos que se detallan en el apartado 15 de las normas FCC.

(1) este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

Nota: Este equipo ha superado las pruebas que lo sitúan dentro de los límites de un aparato digital de clase B conforme al apartado 15 de las normas FCC. Dichos límites ofrecen una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía en forma de radiofrecuencia, y si no se instala según las especificaciones puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones.

No se ofrece garantía alguna de que no puedan producirse interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que utilice los siguientes métodos para eliminar las interferencias:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Incremente la separación entre Mini Mic y el receptor.

- Conectar el equipo a un enchufe perteneciente a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y TV.

Los cambios o modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para manipular el equipo

Uso previsto

Mini Mic permite a los usuarios de audífonos seguir el habla y escuchar mejor otras señales de audio. El funcionamiento esencial de Mini Mic es transmitir las señales desde el micro y otros dispositivos de audio a los audífonos inalámbricos compatibles.

Lista de países:

Los productos con capacidad inalámbrica están destinados para la venta en países dentro de la Comunidad Económica Europea y Suiza.

Restricciones locales:

Noruega: No se permite operar el equipo en un radio de 20 km del centro de Ny Ålesund, Noruega.

Francia Italia

Italia Producto para uso personal. No debe utilizar el equipo fuera de sus instalaciones.

Este producto cumple con las siguientes regulaciones:

En la UE: el dispositivo se ajusta a los requisitos básicos de conformidad con el anexo I de la Directiva 93/42/CEE del Consejo para los dispositivos médicos (MDD) y los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE (R&TTE). La declaración de conformidad se puede consultar en www.resound.com

En EE.UU.: los equipos están sujetos a la certificación de la FCC según CFR 47, apartado 15, subapartado C.

En Canadá: IC 6941C-SM1

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales y
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento del mismo.

Otros requisitos pueden ser aplicables según la legislación vigente en países fuera de la UE y los EEUU. Consulte sus requisitos locales.

Los productos son clasificados como receptores de clase 2 de acuerdo a la norma EN 300 440

Contenido



Descripción.	8
Primeros pasos.	10
Apagar y encender Mini Mic	11
Emparejamiento con sus audífonos	12
Iniciar transmisión.	15
Detener transmisión	17
Cómo llevar Mini Mic inalámbrico	18
Testigo luminoso (LED)	18
Utilización de la entrada directa	19
Control de volumen.	21
Información relevante	23
Advertencias generales.	38
Precauciones generales	29
Especificaciones técnicas.	36
Garantía	32
Guía para solución de problemas	34

Descripción

1. Conector para la recarga Mini-USB
2. Entrada del micrófono
3. Línea de entrada
4. Interruptor de encendido



5. Control de volumen
6. Testigo luminoso (LED)
7. Clip
8. Botón de emparejamiento

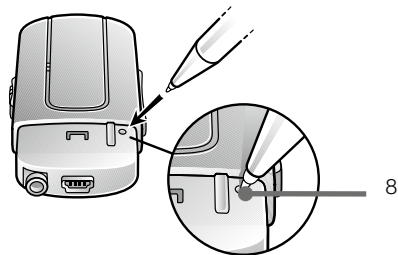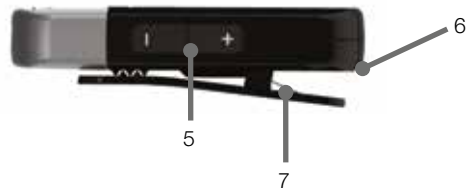

Primeros pasos


Carga de la batería

Antes de utilizar Mini Mic inalámbrico es necesario cargar completamente la batería recargable. Para cargarla, inserte el cable de carga según la ilustración de la derecha. A continuación, enchufe el otro extremo del cable de carga en una toma de corriente.


Durante el proceso de cargado, el testigo luminoso podrá ver una luz fija roja. Cuando esté completamente cargada y conectada al cargador, el testigo luminoso verde se verá interrumpido por una luz roja cada 2 segundos.

La carga de la batería dura aproximadamente 3 horas. Es seguro dejar conectado el cargador por la noche - la batería no puede sobrecargarse.

- Cuando cargue Mini Mic por primera vez, déjelo cargando al menos durante 3 horas, incluso aunque el cargador indique que la batería está completamente cargada.

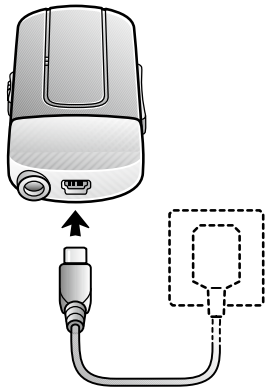

- Por razones de seguridad, recargue la batería únicamente con el cargador proporcionado por su audioprotesista y especialmente diseñado para Mini Mic.

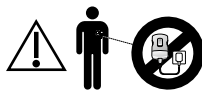

No recargue Mini Mic cuando lo lleve puesto.

Encendido y apagado de Mini Mic

Para encender Mini Mic deslice el interruptor a la posición ON (nº 4 en la página 8) Un icono "I" blanco quedará visible en la base del interruptor y el testigo luminoso parpadeará en verde cada 2,5 segundos.

Si el nivel de la batería está bajo el LED amarillo parpadeará cada 2 segundos.

Para apagarlo, deslice el conmutador ON/OFF a la posición OFF. El LED dejará de parpadear.

Emparejamiento con sus audífonos




Nota: La siguiente información está destinada al audioprotesista, quien en la mayoría de los casos realizará las tareas necesarias para que usted pueda utilizar Mini Mic con sus audífonos. Sin embargo, el proceso diseñado es sencillo y lo puede hacer cualquiera.

Se pueden emparejar hasta tres dispositivos de transmisión, por ejemplo dos Transmisores TV y un Mini Mic (accesorio opcional), con un par de audífonos. Por lo tanto, el canal (1, 2 ó 3) debe seleccionarse al iniciar el proceso de emparejamiento.

Emparejar Mini Mic en el Canal 1

1. Asegúrese de que Mini Mic está encendido. Los audífonos tienen que estar apagados. Deje abiertos los portapilas.
2. Retire la tapa plateada de Mini Mic. Con la punta de un bolígrafo o un objeto similar, presione el pequeño botón de emparejamiento en la parte delantera de Mini Mic (vea la ilustración en la siguiente página). El testigo luminoso parpadeará cada 2 segundos para indicar que está listo para emparejar en el Canal 1. Mini Mic estará en modo de emparejamiento durante 20 segundos.

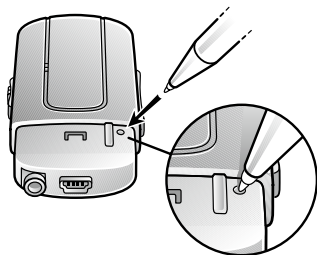

3. Mientras esté activado el modo emparejamiento, cierre los portapilas de ambos audífonos y asegúrese de que están encendidos. Cuando se haya realizado el emparejamiento oírás una melodía audible en ambos audífonos.

Ya puede utilizar el Mini Mic inalámbrico.

Emparejar Mini Mic en el Canal 2 o el 3

Para emparejar Mini Mic en el canal 2, pulse el botón de emparejamiento dos veces. El testigo luminoso parpadeará dos veces cada 2 segundos para indicar que está listo para emparejar en el Canal 2. Cierre los portapilas de los audífonos.

Para emparejar Mini Mic en el Canal 3, pulse el botón de emparejamiento tres veces. El testigo luminoso parpadeará tres veces cada 2 segundos para indicar que está listo para emparejar en el canal 3. Cierre los portapilas de los aparatos.

Patrón de parpadeo por emparejamiento:

Pairing button pushes	LED blinking pattern				Channel
1	①	①	①	①	1
2	①②	①②	①②	①②	2
3	①②③	①②③	①②③	①②③	3

Iniciar transmisión

Encienda Mini Mic y asegúrese de que los audífonos también están encendidos. La transmisión puede iniciarse de dos maneras.

1. Presione de manera constante el pulsador de ambos audífonos durante tres segundos para escuchar la señal de audio transmitida. Una vez se ha conectado Mini Mic, se reproducirá una melodía que deberá oír en sus audífonos a la que le seguirá el sonido transmitido.
2. Si tiene un mando a distancia compatible (opcional), simplemente pulse el botón de transmisión. Si lo hace, se mostrará brevemente un icono de búsqueda en la pantalla del mando a distancia. Una vez que los audífonos estén conectados con Mini Mic, una breve melodía se escuchará en ambos oídos para confirmar la presencia de una señal de audio transmitida y un icono aparecerá en la pantalla. Ya puede oír la señal transmitida en sus audífonos.

Comience la transmisión en un segundo o tercer Mini Mic

Si sus audífonos están emparejados con más de un dispositivo de transmisión, puede comenzar de dos maneras.

1. Presione el pulsador durante 3 segundos una 2ª o 3ª vez para acceder al 2º ó 3er dispositivo de transmisión compatible.
2. Si utiliza un mando a distancia compatible, pulse el botón de transmisión del mando a distancia una segunda o una tercera vez para acceder al segundo o tercer dispositivo de transmisión compatible.



Buscando
Mini Mic



Conectado a
Mini Mic

Botón de
transmisión



Cuando se utiliza un mando a distancia compatible, los programas para dispositivos de transmisión se designan como A, B y C.* El programa en uso se indica en la pantalla del mando a distancia.

** Las designaciones de los programas de escucha las puede personalizar el audioprotesista en el software de programación. Estas personalizaciones se reflejarán en la pantalla del mando a distancia.*

Detener transmisión

- Para detener la transmisión con un mando a distancia (opcional) sólo hay que pulsar el botón "P", ubicado en el centro del teclado. Esto devolverá los audífonos al último programa usado. También puede pulsar el botón Home (Inicio) para volver a la configuración predeterminada.
- Si usa el teléfono con un clip para teléfono compatible, Phone Clip+ o el accesorio PhoneNow™, la transmisión del Mini Mic se interrumpirá temporalmente. Cuando haya finalizado su conversación telefónica, la transmisión se reanudará.










Nota: Mini Mic transmite a una distancia de aproximadamente siete metros (o más). La transmisión puede interrumpirse si la distancia entre el audífono y el micrófono se incrementa más allá del alcance de la transmisión. Si en un periodo de 5 minutos vuelve al espacio de cobertura, los audífonos se reconectarán y continuarán transmitiendo.

Cómo llevar Mini Mic inalámbrico

Enganche Mini Mic a la chaqueta del interlocutor o a alguna otra prenda. Ubique el dispositivo a una distancia de 10-20 cm de la boca del orador.

Testigo luminoso (LED)


El testigo luminoso (nº 6 en la página 9) del Mini Mic sirve como una interfaz multiusos, proporcionando información sobre el estado de su dispositivo.

Blinks	Meaning
	Normal operation
	Battery low
	Charging
	Fully charged – still connected to charger
	Pairing in channel 1
	Pairing in channel 2
	Pairing in channel 3

Utilización de la entrada directa

La entrada directa (nº 3 en la página 8) puede utilizarse para transmitir señales de audio directamente a sus audífonos desde la mayoría de dispositivos de audio a través de la entrada del Mini Mic.

1. Inserte un extremo del cable que se incluye con el micrófono en la línea de entrada del Mini Mic.
2. Conecte el otro extremo del cable a la salida de audio del dispositivo desde el que quiere transmitir.

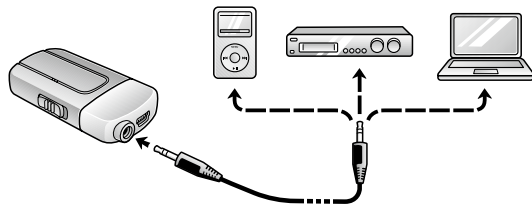



Nota: Cuando utilice Mini Mic con una televisión, se puede usar la salida de auriculares que suele estar en el lateral o el frontal de la televisión. Cuando utilice la terminal de salida de audio para auriculares de la televisión, sólo la persona que utiliza audífonos escuchará el sonido y los altavoces de la televisión estarán en silencio. Consulte el manual del televisor para determinar si permite usar altavoces y auriculares simultáneamente.

Control de volumen

El Mini Mic ha sido diseñado para proporcionar un nivel de sonido cómodo desde el momento en que se activa. Sin embargo, para algunos audífonos o entornos sonoros puede ser deseable ajustar el volumen. Se puede conseguir de varias maneras. Tenga en cuenta que los ajustes de volumen se aplican sólo a la señal transmitida, no al volumen de los sonidos ambientales normales.

- Utilice las teclas "+" y "-" (nº 5 en la página 9) para ajustar el volumen a un nivel confortable. Asegúrese de que el volumen de los audífonos se establece en un nivel cómodo antes de ajustar la configuración en su Mini Mic



Nota: Cuando utilice Mini Mic como micrófono se grabará el último parámetro de ajuste de volumen. Cuando utilice la entrada directa, el volumen se ajustará al valor pre-determinado al apagar Mini Mic para evitar un nivel de sonido inicial desagradable cuando vuelva a utilizarlo con otras fuentes de audio.

- Utilice el mando a distancia (opcional) para ajustar el volumen de transmisión de los audífonos. Solicite al audioprotesista más información sobre este accesorio.
- En algunos casos, el volumen puede ajustarse en la fuente de la señal, por ejemplo bajando el volumen del propio televisor. En muchos casos esto ajustará el volumen del audio transmitido (transmitido de forma inalámbrica a sus audífonos) y audio no transmitido (los sonidos llegan a los micrófonos de los audífonos en la forma normal). Por supuesto, esto también afectará al volumen de escucha de los demás.

Información relevante



Cuidados y mantenimiento

- Limpie Mini Mic con un paño húmedo. Nunca utilice productos de limpieza (detergente, jabón etc) ni alcohol para limpiar el dispositivo.
- Cuando no esté utilizando Mini Mic, apáguelo y guárdelo en lugar seguro.
- Proteja Mini Mic de la humedad excesiva (baño, ducha) y calor (radiador, o salpicadero del coche). Protejalo de los golpes y las vibraciones.
- Proteja el micrófono y las entradas del cargador de la suciedad. Si fuera necesario, utilice el cepillo de limpieza de sus aparatos para limpiar estas áreas.

Advertencias generales



- Los niños pueden ahogarse con los cables. Por lo tanto, deje siempre los cordones y los cables fuera del alcance de los niños.
- El Mini Mic utiliza transmisiones codificadas digitalmente para comunicarse con otros dispositivos inalámbricos. Aunque es poco probable, otros dispositivos electrónicos cercanos pueden verse afectados. En ese caso, aparte Mini Mic del dispositivo electrónico afectado.
- Cuando utilice Mini Mic y el dispositivo se vea afectado por una interferencia electromagnética, apártese de la fuente.
- Evite exponer su producto a la lluvia, humedad y otros líquidos para evitar que se dañen o que le puedan causar daños.
- Mantenga el producto y los cables y cordones lejos de maquinaria de funcionamiento.
- Si el producto se sobrecalienta, se cae o daña, si tiene un cable o enchufe dañado, o cae en un líquido, interrumpa el uso y consulte a su audioprotesista.
- Deseche el producto según las normas y legislación locales.
- No lo utilice en zonas donde haya peligro de explosión.

Los ambientes inflamables

- No utilice el producto en entornos donde existe peligro de incendio por gases inflamables

Precauciones generales



- No utilice el dispositivo en lugares donde estén prohibidos los dispositivos electrónicos.
- La radiación de rayos X (por ejemplo los escáneres CT y MRI) puede afectar negativamente al uso de este dispositivo. Le recomendamos que apague el dispositivo antes de someterse a un procedimiento de rayos-X y lo deje fuera de la sala.
- Los equipos electrónicos de alta tensión, las instalaciones eléctricas superiores y las estructuras metálicas pueden inhabilitar y reducir significativamente el rango operativo.
- Si los audífonos no responden al dispositivo por algún tipo de alteración inusual en el campo, aléjese de esa zona.
- Los audífonos y este dispositivo se han emparejado exclusivamente durante la adaptación. Así se garantiza que el dispositivo no afectará a los audífonos que utilicen otras personas.
- No realice modificaciones o alteraciones al dispositivo.

- Abrir Mini Mic podría dañarlo. Si ocurre un problema que no puede resolverse, consulte con su audioprotesista.
- El Mini Mic solo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- No utilice Mini Mic en las zonas en las que la transmisión por radio frecuencia está prohibida, como los aviones.
- Para conectar Mini Mic utilice los cables suministrados con el dispositivo.

Cuidado de la batería integrada: Por favor, tenga en cuenta que el producto contiene una batería



- Su producto se alimenta de una batería recargable.
- El pleno funcionamiento de una nueva batería se consigue únicamente después de tres ciclos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente se desgastará.
- Desenchufe el cargador del enchufe y del Mini Mic cuando no lo esté utilizando.
- Si lo deja sin usar, una batería completamente cargada perderá la carga a lo largo del tiempo.
- Dejar el producto en lugares calientes, como un coche cerrado o el clima de verano, reducirá la capacidad y la durabilidad de la batería.
- Un producto con una batería fría puede no funcionar temporalmente, incluso aunque esté plenamente cargado. El funcionamiento de la batería está particularmente limitado en temperaturas por debajo de punto de congelación.



- "Cuidado"- la batería utilizada en este producto puede correr riesgo de incendio o de combustión química si no se trata con cuidado.
- No intente abrir el producto ni sustituir la batería. Está integrada y no se puede sustituir. El uso de otras baterías puede presentar riesgo de incendio y explosión y quedará anulada la garantía.
- La batería en su producto no puede sustituirse ni retirarse por el usuario. Cualquier intento de hacerlo es arriesgado y puede resultar en daños al producto.
- Sólo recargue Mini Mic con una unidad de carga que se haya proporcionado junto con el producto.
- Deseche el producto según las regulaciones locales. Por favor, recicle cuando sea posible
- No tire la batería a la basura de casa ni al fuego porque puede explotar.
- La batería puede explotar si está dañada.



- No intente cargar el producto con ninguno otro dispositivo distinto al adaptador incluido. El uso de cualquier otro tipo podría dañar el producto y resultar peligroso. El uso de otros cargadores puede invalidar la aprobación o la garantía.
- Para conocer la disponibilidad de las características aprobadas, consulte a su audioprotesista.
- Cargue el producto según las instrucciones proporcionadas por el proveedor.

Información de advertencia del cargador



- Cuando desconecte el cable de alimentación o cualquier otro dispositivo, tire directamente del enchufe, no del cable.
- Nunca utilice un cargador que esté dañado.
- No intente desmontar el cargador pues puede exponerle a una peligrosa descarga eléctrica.
- El montaje incorrecto puede causar descarga eléctrica o incendio en usos posteriores.
- Evite cargar el producto en temperaturas extremadamente altas o bajas y no utilice el cargador en el exterior ni en zonas húmedas.
- No recargue Mini Mic cuando lo lleve puesto.

Especificaciones técnicas

Rango de operación:	hasta 7 metros
Sistema de alimentación:	adaptador a la red
Inalámbrico	2,4 GHz
Temperatura de funcionamiento:	0° a 45° C
Temperatura de almacenamiento:	-20° a 45° C

Prueba de temperatura, transporte y almacenamiento

El producto se somete a diferentes pruebas de temperatura y ciclos de calor húmedo de entre -25 °C y 70 °C según los estándares internos y de la industria.

Garantía

El Mini Mic está cubierto por una garantía emitida por el fabricante durante 12 meses desde el día de la compra original. Puede ser que en su país se apliquen extensiones de garantía. Solicite más información a su audioprotesista.

¿Qué cubre la garantía?

Cualquier componente eléctrico que debido a su acabado, fabricado o diseño no funcione apropiadamente en el uso normal durante la vida de la garantía será sustituido o reparado sin cargo de las partes ni de la mano de obra cuando se devuelva al punto de compra.

Si se determina que la reparación no es posible, toda la unidad podría ser sustituida con una unidad equivalente bajo mutuo acuerdo entre el audioprotesista y el cliente.

¿Qué no cubre la garantía?

Los problemas que surjan de un mal manipulado o cuidado, uso excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por un tercero no autorizado, exposición a condiciones corrosivas o daños debidos a objetos externos introducidos en el aparato, no quedan cubiertas por la garantía y pueden invalidarla. La garantía no afecta los derechos legales que pueda tener al amparo de la legislación nacional aplicable en lo relativo a la venta de productos de consumo. El audioprotesista puede haber emitido una garantía adicional que vaya más allá de las cláusulas de esta garantía limitada. Consulte con el audioprotesista para obtener más información

Número de serie: _____

Fecha de la compra: _____

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>El botón de transmisión del Mando a Distancia está presionado pero no se produce ningún efecto</i>	El Mini Mic y los audífonos no se han emparejado	Realice el proceso de emparejamiento
	El mando a distancia y los audífonos no están en el rango inalámbrico	Asegúrese de que el Mando a Distancia y los audífonos están en el rango inalámbrico y vuelva a activar la transmisión
<i>El pulsador del aparato se ha presionado durante más de 3 segundos sin ningún efecto</i>	El Mini Mic y los audífonos no se han emparejado	Realice el proceso de emparejamiento
<i>El botón de emparejamiento del Mini Mic está pulsado pero no se escucha ninguna melodía en los audífonos</i>	El Mini Mic y los audífonos no están dentro del rango inalámbrico	Asegúrese de que Mini Mic y los audífonos están dentro del alcance inalámbrico y repita el proceso de emparejamiento
	El Mini Mic y los audífonos no están en modo de emparejamiento simultáneamente	Repita el proceso de emparejamiento y asegúrese de que los portapilas de ambos audífonos se cierran en los 20 segundos subsiguientes a pulsar el botón de emparejamiento del Mini Mic

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>El botón de transmisión del mando a distancia está presionado pero no se localiza ninguna señal acústica cuando se busca (se indica con una "x" en la pantalla)</i>	El Mini Mic y los audífonos no están dentro del rango inalámbrico	Asegúrese de que Mini Mic y los audífonos están dentro del alcance inalámbrico y repita el proceso de emparejamiento
	El Mini Mic no está conectado	Conecte Mini Mic y vuelva a activar la transmisión
	El nivel de batería del Mini Mic es demasiado bajo para permitir la transmisión	Cargue la batería
	Se ha conectado un dispositivo de audio a la entrada- pero el dispositivo no está conectado o la salida se ha silenciado	Encienda o de voz al dispositivo de audio externo

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>No hay sonido en los audífonos aunque están en un programa de transmisión</i>	El Mini Mic y los audífonos no están dentro del rango inalámbrico	Asegúrese de que Mini Mic y los audífonos compatibles vuelven a estar dentro del alcance inalámbrico
	El Mini Mic no tiene potencia	Conecte Mini Mic y vuelva a activar la transmisión
	El nivel de batería es demasiado bajo para permitir la transmisión	Cargue la batería
	Se ha conectado un dispositivo de audio a la entrada pero el dispositivo se ha apagado o la salida se ha silenciado	Encienda o de voz al dispositivo de audio externo

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>Uno de los audífonos se desconecta del programa de transmisión</i>	Al menos una de las causas descritas para el síntoma "sin sonido" ha persistido durante más de 5 minutos	Tome la acción necesaria, descrita como síntoma "sin sonido" arriba y vuelva a activar la transmisión
	La pila del audífono está tan agotada que ya no permite la transmisión de audio:	Sustituya la pila del aparato por una nueva, y vuelva a activar la transmisión
<i>El sonido del Mini Mic es demasiado alto o está distorsionado</i>	Se ha conectado un dispositivo de audio a la entrada directa y el nivel de sonido del dispositivo es demasiado fuerte	Ajuste el volumen con las teclas "+" o "-" en Mini Mic, o utilizando el control de volumen del mismo dispositivo de audio externo, hasta que consiga mejor nivel y calidad de sonido

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>El nivel de sonido del Mini Mic es muy bajo</i>	El orador no se ha colocado correctamente Mini Mic	Enganche Mini Mic a la chaqueta del orador o a otra prenda, o cuélguelo alrededor de su cuello utilizando el cordón para que el dispositivo quede a 10 ó 20 cm de la boca
	El sonido recibido por el micrófono es muy bajo	Incremente el volumen utilizando la tecla "+" del Mini Mic
	Se ha conectado un dispositivo de audio a la entrada directa y el nivel de sonido del dispositivo es demasiado bajo	Ajuste el volumen con las teclas "+" o "-" en Mini Mic, o utilizando el control de volumen del mismo dispositivo de audio externo, hasta que consiga mejor nivel y calidad de sonido

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>El sonido del Mini Mic sigue siendo demasiado alto o demasiado bajo</i>	El nivel del volumen de audio de los audífonos no es apropiado para escuchar	Ajuste el volumen en los propios audífonos (si tienen control de volumen), o utilice las teclas "+" y "-" del mando a distancia compatible
<i>El sonido del Mini Mic está distorsionado o se desconecta frecuentemente</i>	El Mini Mic y los audífonos están situados al límite del rango inalámbrico	Asegúrese de que Mini Mic y los audífonos compatibles vuelven a estar dentro del alcance inalámbrico
	El Mini Mic y los audífonos están en el límite del alcance inalámbrico	Asegúrese de que no hay obstáculos importantes que obstruyan la transmisión del Mini Mic a los audífonos

Preste atención a la información que contenga los símbolos de advertencia:



ADVERTENCIA indica una situación que podría causar lesiones graves,
CUIDADO indica una situación que podría dar lugar a lesiones leves y moderadas



Consejos y trucos sobre cómo puede manejar mejor sus audífonos.



El equipo incorpora un transmisor de radiofrecuencia



Este producto está clasificado como Tipo B



Pregunte a su audioprotesista cómo desechar sus accesorios inalámbricos



0297

Cualquier cuestión relacionada con las Directivas de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE y 1995/5/CEE debe dirigirse a GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Dinamarca.

Fabricante

GN Hearing A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Dinamarca

Tel.: +45 45 75 11 11

Fax: +45 45 75 11 19